

## Energy-Pak

PZN 332 717 3

### 1 Magnetfolie

Es empfiehlt sich, die zur Anwendung der Magnetfolie ausgewählte Körperstelle vor der Anbringung der Magnetfolie mit den beiliegenden Tupfern gründlich zu reinigen. Das Schutzpapier vom Befestigungs-Pflaster abziehen und Magnetfolie mit Goldseite zentral auf das Pflaster kleben. Diese Einheit auf die Anwendungsstelle am Körper befestigen. Nach Gebrauch wird das Befestigungs-Pflaster von der Magnetfolie entfernt. Bei starkem Juckreiz oder entzündlichen, allergischen Reaktionen ist die Magnetfolie zu entfernen. Vor erneuter Anwendung muss die Entzündung abgeklungen sein. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, auch nach Verschwinden der Beschwerden die Magnetfolie noch einige Tage weiterzutragen, um den Erfolg zu stabilisieren. Die Magnetfolie kann auch als Vorbeuge-Massnahme angewendet werden. Die Magnetfolie nicht auf offene Wunden anbringen. Bei Blutergüssen darf die Magnetfolie erst ab dem 4. Tag angewendet werden. Personen mit Herzschrittmacher dürfen die Magnetfolie nicht verwenden. Die Magnetfolie darf nicht im Bereich von metallgenagelten Knochenbrüchen angebracht werden.

Bei bestimmten physikalischen Therapien, wie z. B. Kurzwellen-Therapie soll die Magnetfolie vorher entfernt werden. Magnetfolie fernhalten von Ton- und Videoträgern, Scheck- sowie Kreditkarten und sonstigen Geräten, die durch die hohe Energiedichte Schaden nehmen könnten.

### Art und Dauer der Anwendung:

Die Magnetfolie kann ca. 6-8 Tage getragen werden. Nach einer Pause von 1 Tag kann man sie wieder verwenden.



Zusätzliche Informationen zu diesem oder weiteren Produkten erhalten Sie auch unter:

Allpharm Vertriebs-GmbH · Langgasse 63 · 64409 Messel · Tel. +49 (0) 61 59 - 71 70 - 0 · Fax +49 (0) 61 59 - 71 70 - 10 · eMail: info@allpharm.de · Internet: www.allpharm.de